

Checklista skötsel av amalgamavskiljare



Vecka _____

VARJE ARBETSDAG	MÅN	TIS	ONS	TORS	FRE	LÖR	SÖN	AVVIKELSER/ÖVRIGT
Desinfektion av sugsystem och fontänskål	S	I	G	N	A	T	U	R
Desinfektion av avlopp där diskbänksavskiljare finns	S	I	G	N	A	T	U	R
Tömning av innehåll från grovsil/salivsugfilter/partikelfälla i godkänt uppsamlingskärl för kvicksilveravfall. Sil/filter sköljs sedan i avlopp där diskbänksavskiljare finns.	S	I	G	N	A	T	U	R
Driftstörning	S	I	G	N	A	T	U	R
EN GÅNG PER VECKA VID VÅTT SUGSYSTEM	MÅN	TIS	ONS	TORS	FRE	LÖR	SÖN	
Besiktning av rum där amalgamavskiljare och sugsystem finns för att upptäcka eventuella missljud eller läckage	S	I	G	N	A	T	U	R
Kontroll av backventil/sekretavskiljare genom att lossa slangen innan avloppet och känna på utloppet att sugfunktion finns	S	I	G	N	A	T	U	R



Med ekonomiskt stöd från EU:s program för klimat och miljö